

# Une maintenance rapide et aisée : l'avantage Inogen.

Votre fournisseur :

Votre médecin :



326 Bollay Drive,  
Goleta, CA 93117  
1-877-4-INOGEN (numéro vert)  
1-877-446-6436 (numéro vert)  
1-805-562-0515 (international)  
info@inogen.net  
www.inogen.com


96-06731-01-01-B

## INOGEN ONE<sup>G4</sup> Manuel de remplacement de colonne




# INOGENONE<sup>G4</sup>

Pour remplacer les colonnes de votre Inogen One G4 :


- 1 Éteignez le concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4 en appuyant sur le bouton marche/arrêt  pour couper l'appareil.
- 2 Retirez le concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4 de sa sacoche de transport (si elle est fournie).




Retirez la batterie du concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4.

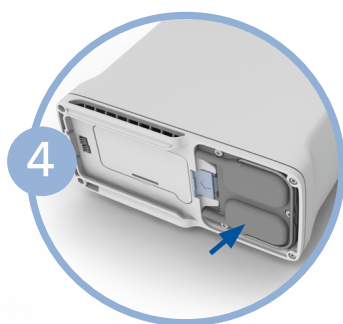


Posez le concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4 sur le côté de manière à ce que le dessous soit visible. L'ensemble de colonnes métalliques est visible sur un côté de l'appareil.

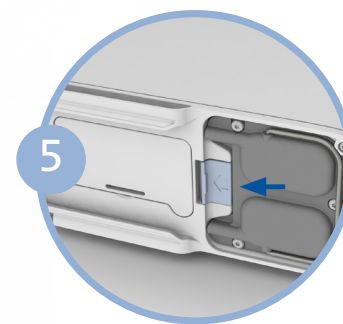


Déverrouillez l'ensemble de colonnes en poussant le bouton de verrouillage pour l'éloigner des colonnes.

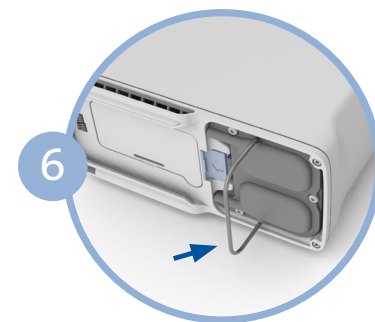

Tout en maintenant le bouton en position ouverte, faites glisser l'ensemble de colonnes pour le sortir de l'appareil en tirant sur la poignée de la colonne.

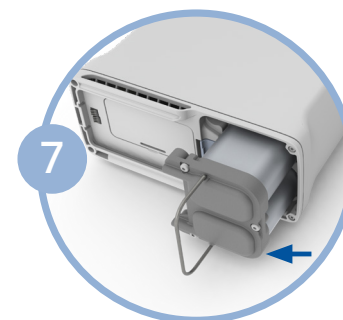


Retirez complètement les colonnes de l'Inogen One<sup>®</sup> G4. Les deux colonnes sont retirées ensemble.

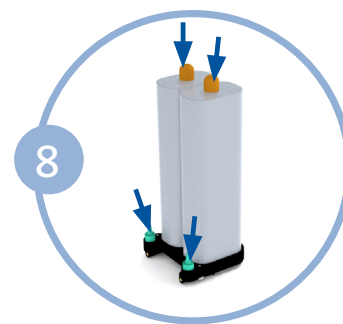


Retirez les caches de protection contre la poussière du nouvel ensemble de colonnes. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de débris à l'endroit où se trouvaient les caches anti-poussière.



Insérez l'ensemble de colonnes dans le concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4. Ne laissez pas les extrémités de la colonne exposées ; l'ensemble de colonnes doit être inséré dans l'Inogen One G4 dès que vous avez retiré les caches anti-poussière.

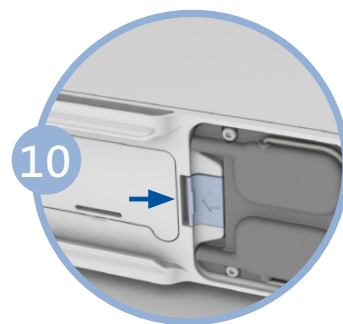
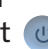


Enfoncez l'ensemble de colonnes dans l'appareil de façon à ce que les colonnes soient bien positionnées dans le concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4. Le bouton de verrouillage à ressort doit complètement revenir en position fermée.

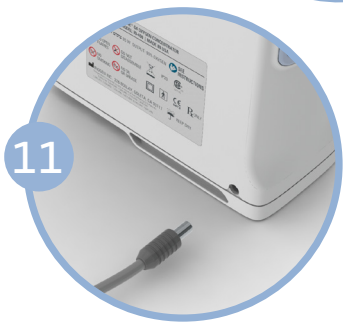

Connectez le cordon d'alimentation c.a. à l'Inogen One<sup>®</sup> G4 et branchez-le sur une prise électrique. Ne mettez pas le concentrateur Inogen One<sup>®</sup> G4 sous tension.



Appuyez une fois sur le bouton d'alerte/cloche  et l'écran affiche « Réinitialisation du tamis achevée ». Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer l'Inogen One<sup>®</sup> G4, puis utilisez-le normalement.



Appuyez sur le bouton « plus » (+) et le bouton « moins » (-) et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. L'écran affiche le message « Réinitialisation du tamis ». Relâchez les boutons une fois que ce message s'affiche à l'écran.

**REMARQUE** Les consignes de remplacement de la colonne doivent uniquement être utilisées si un entretien est nécessaire et ne sont pas conçues à des fins d'entraînement