

Snabbt och enkelt underhåll det är fördelen med Inogen.

INOGEN ONE^{G4} Vägledning för byte av kolumn



Din leverantör:

Din läkare:



326 Bollay Drive,
Goleta, CA 93117
1-877-4-INOGEN (Avgiftsfritt)
1-877-446-6436 (Avgiftsfritt)
1-805-562-0515 (Internationellt)
info@inogen.net
www.inogen.com

96-06731-07-01-B




INOGEN ONE^{G4}

För att byta kolumner på din Inogen One G4, gör först så här:


- 1 Stäng av Inogen One[®] G4-koncentratorn genom att trycka på strömbrytaren för att stänga av enheten.
- 2 Avlägsna Inogen One[®] G4-koncentratorn från väskan (i förekommande fall).




3 Ta ut batteriet ur Inogen One[®] G4-koncentratorn.

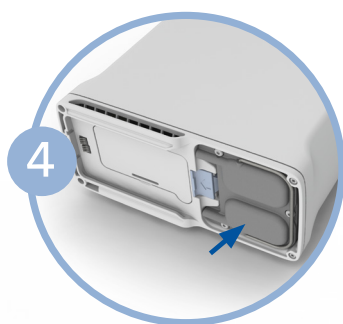


4 Placera Inogen One[®] G4 koncentratorn på sidan så att undersidan är synlig. Metallkolumnen kan ses på enhetens ena sida.

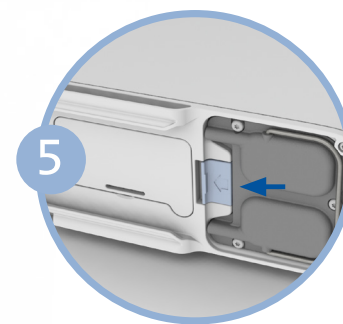


5 Lås upp kolumnen genom att trycka spärknappen bortåt från kolumnerna.

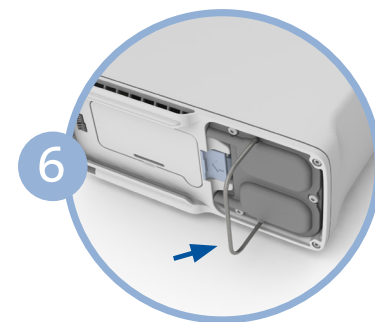

6 Håll knappen öppen, ta ut kolumnen ur enheten genom att dra i kolumnens handtag.

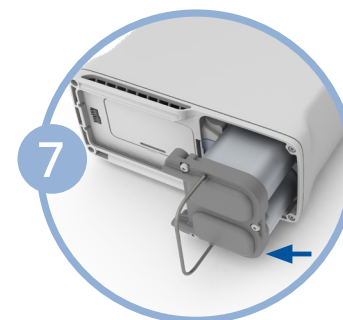


7 Ta bort kolumnen helt från Inogen One[®] G4. Båda kolumnerna tas bort i ett stycke.

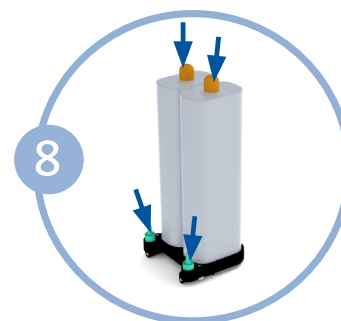

8 Ta bort dammskydden på den nya kolumnen. Se till att det inte finns damm eller skräp där skydden är placerade.



9 Sätt in kolumnenheten i Inogen One[®] G4-koncentratorn. Lämna inte kolumnen oskyddad, den bör införas i Inogen One G4 så snart dammskydden har tagits bort.

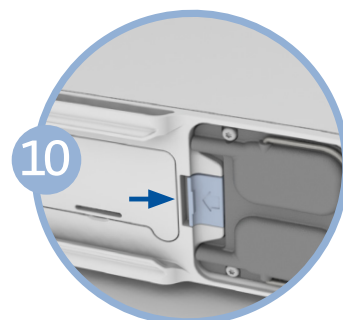


10 Skjut kolumnen in i enheten så att kolumnen sitter ordentligt i Inogen One[®] G4-koncentratorn. Den fjäderbelastade spärknappen ska helt återgå till det stängda läget.



13 Tryck på larm-/klockknappen en gång och skärmen kommer att visa "sieve reset success". Tryck på ström-knappen för att slå på Inogen One[®] G4 och använd normalt.



12 Tryck och håll ned plus- (+) och (-) minusknappen i 5 sekunder. Meddelandet "sieve reset" visas på skärmen. Släpp knappen när meddelandet visas på skärmen.

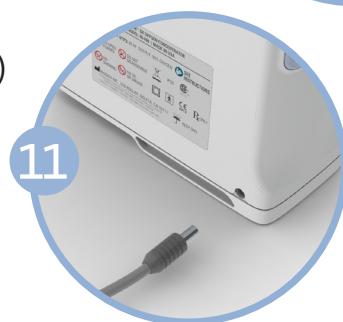

11 Anslut AC-strömkabeln till Inogen One[®] G3 och anslut nätsladden till ett eluttag. Sätt inte på Inogen One[®] G4-koncentratorn.

OBS Anvisningarna för kolumnbyte ska endast användas när underhåll krävs och är inte avsedda för praktiska syften

FORTSÄTTER PÅ BAKSIDAN →